

### Jeringa Vacunador Colibrí Metálico 5 cc. Ref. 10819

#### Descripción

Esta jeringa es de uso veterinario, no se recomienda su uso para dosificar herbicidas, fungicidas y solventes industriales que contengan compuestos clorados concentrados.

Su material es resistente a los diferentes medicamentos aplicados.

#### Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga: 5 cc.

Materiales:

- \*Polipropileno
- \*Policarbonato
- \*Bronce latón
- \*Vidrio
- \*Acero Inoxidable

#### Atributos


- \*Jeringa reutilizable.
- \*Su diseño ergonómico le permite aplicar de forma segura dosis precisas a sus animales.
- \*El sistema de sello Luer lock garantiza que no se presente fugas y que no haya desperdicios innecesarios.
- \*El cilindro de vidrio ofrece alta transparencia.
- \*Todas las piezas no metálicas son echas en polímeros de alta tecnología que permiten la esterilización casera en agua hirviendo.
- \*Las partes metálicas están recubiertas con materiales neutros para garantizar la durabilidad y para evitar la erosión del metal y los depósitos de óxido.



#### Recomendaciones de uso

\*Después de cada uso limpie bien su jeringa y lubríquela con TENSILATO (Ref. 11025). Cambie los empaques con regularidad para garantizar el buen sello del equipo.

\*Nunca utilice empaques LHAURA con cetonas, acetonas, líquido de frenos o similares, amoníaco o compuestos con etanol. Esto implicará la ruptura de las propiedades fisicoquímicas del empaque y la jeringa perderá todo tipo de sello entre el pistón y el cilindro.

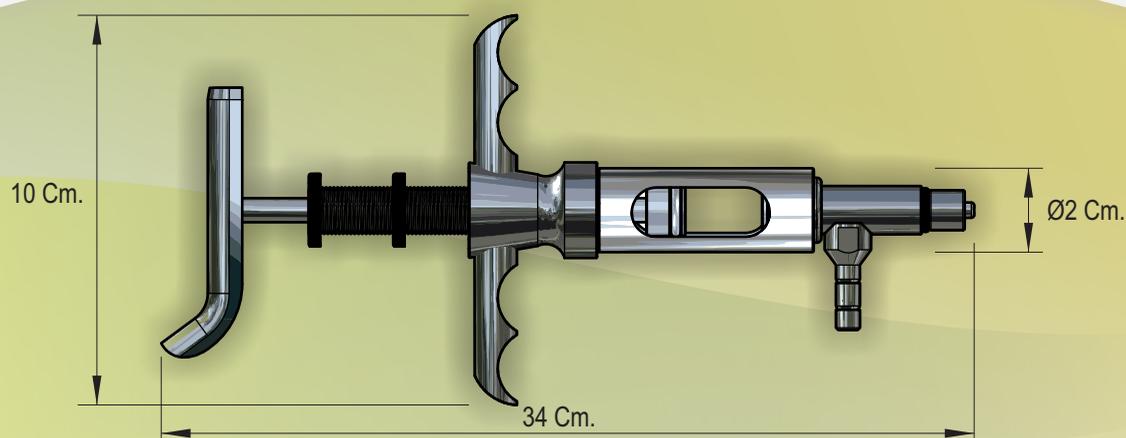

**Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.**

Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35 Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: [serviciante@lhaura.com](mailto:serviciante@lhaura.com) Bogotá D.C. Colombia.  
[www.lhaura.com](http://www.lhaura.com)