

LHAURA


ARETE PARA MARCAR GANADO

Recomendaciones de uso

Si usted realiza estas instrucciones paso a paso, garantizará el éxito de la operación.

1

Tenga a mano todos los elementos a usar.

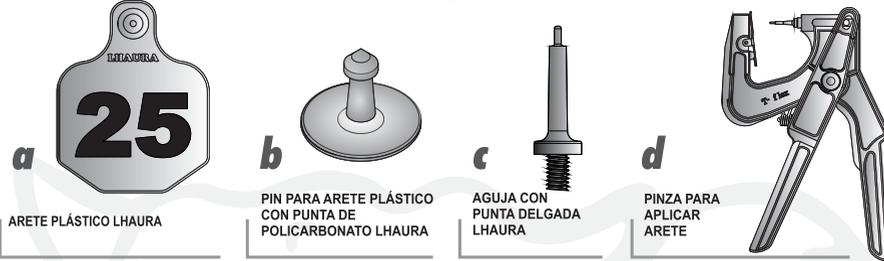

ARETE PLÁSTICO LHAURA


PIN PARA ARETE PLÁSTICO CON PUNTA DE POLICARBONATO LHAURA

AGUJA CON PUNTA DELGADA LHAURA

PINZA PARA APLICAR ARETE

e

AGUA CON JABÓN (DISUELTA)

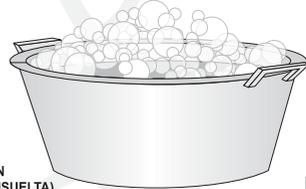

f

DESINFECTANTE COMO ALCOHOL, YODO, AGUA OXIGENADA, ETC.




g

MARCADOR O PLUMÓN DE COLOR DIFERENTE AL GANADO A MARCAR



2

Coloque la aguja Lhaura de punta delgada a la pinza.

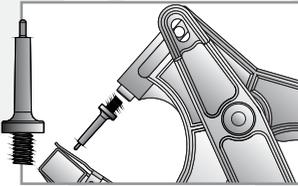

3


Con sus manos gire la oreja y desinféctela.



IMPORTANTE: El arete Lhaura, queda mejor aplicado con este tipo de aguja Lhaura de punta delgada porque facilita la entrada perfecta del pin y el arete.

4


Coloque el pin Lhaura en la aguja y el arete Lhaura en la horquilla de la pinza.

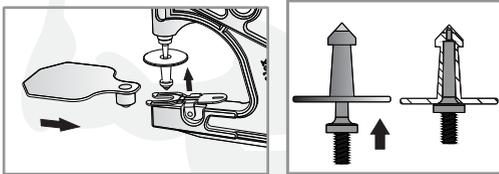

IMPORTANTE: La forma de la aguja de punta delgada Lhaura y el orificio que tiene el pin Lhaura permiten una adaptación ideal de juntos elementos, calidad que facilita la aplicación del arete, como lo indica esta gráfica.


5

Marque en el centro de la oreja (cartilago), el sitio de la aplicación.

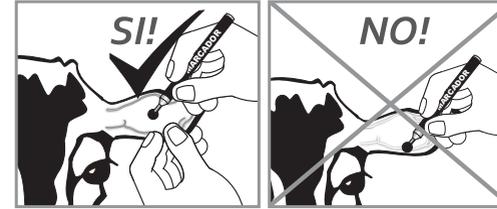


6

Lubrique con agua y jabón el pin Lhaura y la entrada del arete Lhaura para que facilite la perforación.

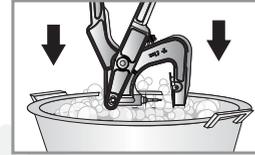


7

Aplice el arete Lhaura con presión firme, y tenga presente la importancia que al colocarlo quede derecho como muestra la gráfica.

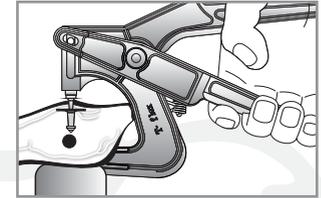

8

Finalmente abra la pinza liberando la aguja y hale con firmeza

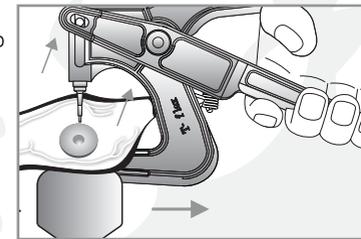

Suminstramos aretes pequeños, medianos y grandes numerados o sin numerar, de colores vistosos como rojo, amarillo, verde, blanco, azul y naranja o por pedido a su elección.



PRECAUCIONES

- En áreas donde los ectoparásitos son endémicos, aplique el repelente apropiado al área donde se hizo la perforación.
- Fallas en los procedimientos antisépticos al aplicar los aretes, particularmente cuando las orejas están mojadas o contaminadas con materia fecal, pueden resultar en infecciones y pérdidas de los aretes. Cuando se bañan los animales en soluciones contaminadas inmediatamente después de aplicar los aretes, puede resultar también en infecciones y pérdida de los aretes.

www.lhaura.com

Parque Industrial Occidente II Calle 22A No. 132 - 72 Int. 35 PBX: 418 1194 Fax: 57-1- 418 1172
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 e-mail: serviciocliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.



Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad certificado de acuerdo con ISO 9001 por SGS Colombia S.A.

Fabricado bajo un sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo con ISO 14001 por SGS Colombia S.A.